


HALLINS

Batteribyte/Battery change för/for

Reflex 70, Eurokraft 75, Newton 50,70,100,150

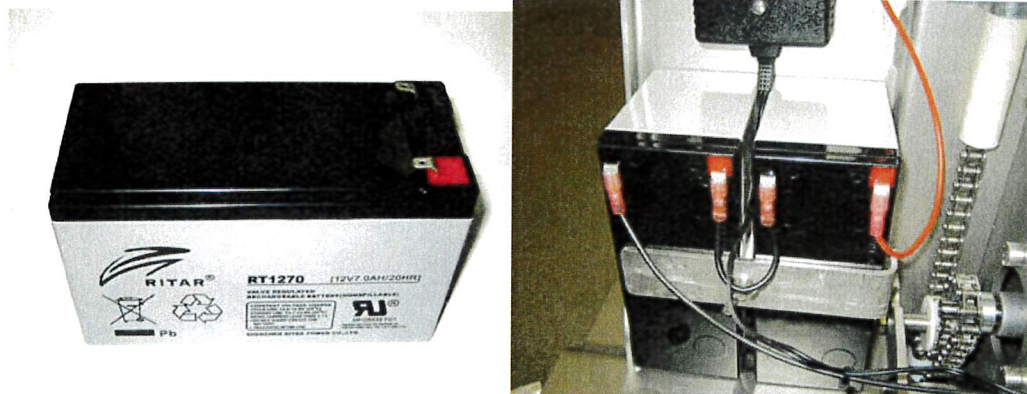

Batteri Typ RT1280 / 12V / 7AH

Instruktion/Instruction

1. **STÄNG** av huvudströmbrytaren innan du tar ut det gamla batterierna
Turn off the power before removing the old batteries.
2. Koppla bort plus (röd) och minuspolerna (svart), ta där av bort batteribygeln och sedan ta ut batterierna
Disconnect the positive (red) and negative (black), remove the battery jumper and then remove the batteries.
3. Sätt in det nya batterierna tillsammans.
Insert the new batteries together
4. Sätt dit batteribygeln från Minus på det ena batteriet till plus på det andra. (nu ska de finnas en minus respektive en pluspol kvar).
Install battery jumper from negative on one battery to positive on the other. (Now they have a negative and a positive terminal left).
5. Koppla in plus (röd) respektive minus (svart) på de lediga platserna.
Connect the positive (red) and the negative (black) on the vacant seats.
6. Nu är lyften klar för att använda.
Now, the lift is ready to use.

Vid tekniska frågor kontakta/For technical questions contact
Joachim Karlsson
+46 (0) 733-659547
joachim.karlsson@hallins.com

AB Hallins Verkstäder

Box 24, Fabriksvägen 4
SE-599 21 Ödeshög, Sweden
Phone: +46 (0) 144-15300
Fax +46 (0) 144-3140
E-mail: info@hallins.com
www.hallins.com